

Pronk
ergo

Comfort-Seat



Handleiding



Doucheföhn toiletzitting

Type: Blooming Bidet

Modellen: Basic en AB

Pronk
ergo

Basisunit

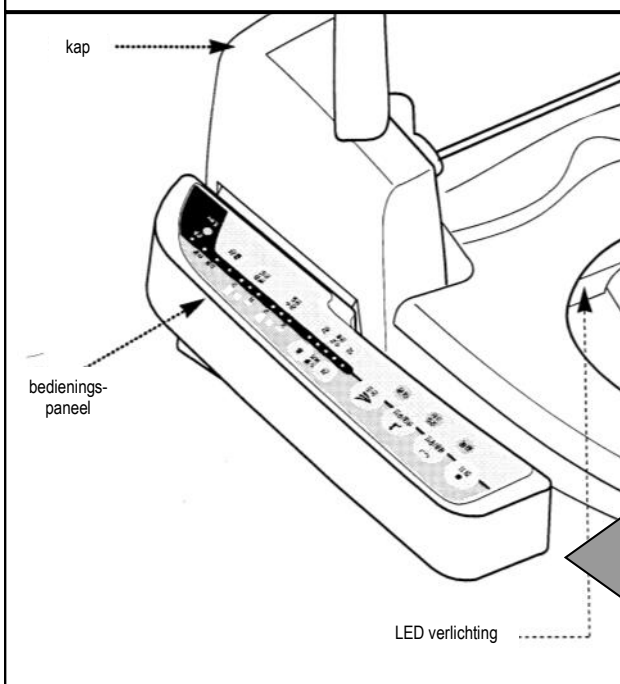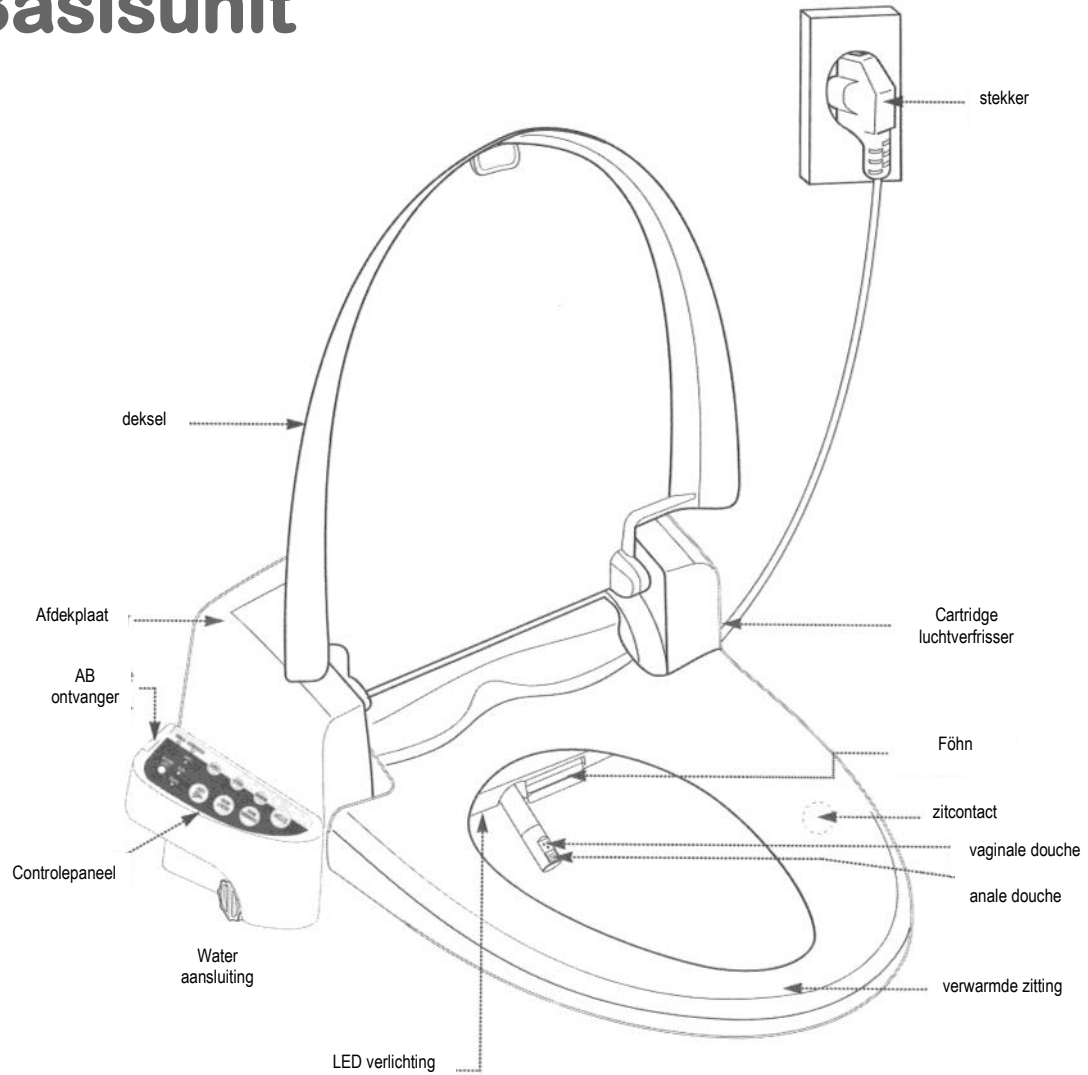


Model
AB


Model
Basic

Comfort-Seat

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Comfort-Seat. In deze handleiding vindt u uitleg over de verschillende functies van de toiletzitting. Mocht u na het lezen nog een vraag hebben dan kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling.

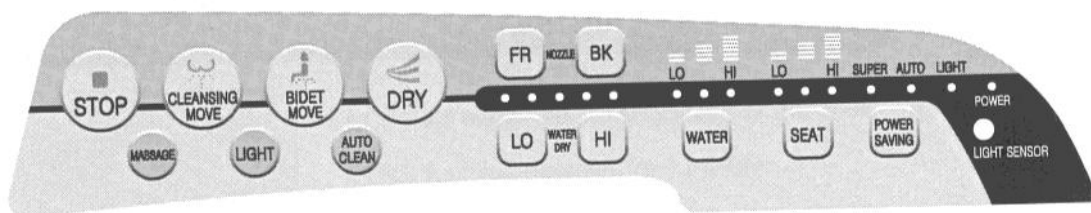

Bedieningspaneel model (*model basic*)

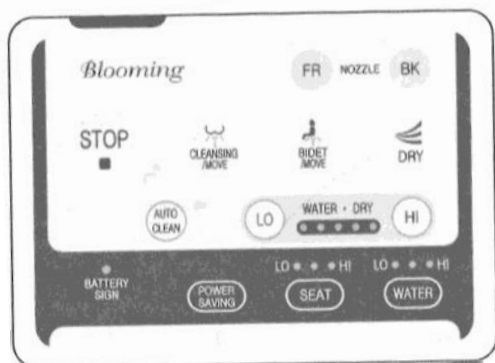

Bedieningspaneel
Afstandsbediening
(*model AB*)



Controlepaneel
op de zitting
(*model AB*)

Basisinstructies

1 Neem plaats op de zitting



- Ga goed in het midden van de zitting zitten.

2 Druk op de knop CLEANSING of BIDET



- Druk op de knop CLEANSING voor de vaginale douche
- Druk op de knop BIDET voor de anale douche
- Beide functies worden voor 1 minuut geactiveerd.
- Tijdens het gebruik kan gewisseld worden.
- Een pieptoon geeft aan dat het douchen wordt beëindigd.

3 Druk op de knop DRY



- De WATER • DRY indicator licht op en de föhn wordt gestart.
- U wordt 3 minuten geföhnd. (Tijdens de automatische schoonmaak 1 minuut)
- Een pieptoon geeft aan dat het föhnen wordt beëindigd.

4 Druk op de knop STOP



- Hiermee kunt u alle functies stopzetten.

Algemene informatie

- Gaat u tijdens het gebruik van de Comfort-Seat, goed in het midden van de zitting zitten. (Het zitcontact kan weigeren als u niet in het midden plaats neemt)
- Wanneer de douchefunctie meerdere keren achter elkaar wordt ingeschakeld zal de watertemperatuur langzaam zakken. Om weer warm water te krijgen wacht u drie minuten voor u de douchefunctie weer inschakelt.
- Reinig de Comfort-Seat AB niet met bijtende of schurende chemische schoonmaakmiddelen. Gebruik een zachte licht vochtige doek. Haal de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken en voorkom dat er water op het apparaat terecht komt.

Overige functies

De knop MOVE (zwenkende douche)

- Wanneer u twee keer op de knop CLEANSING of BIDET drukt, zal de douchemond heen en weer worden bewogen tijdens het douchen.
- Door nog een keer op de knop te drukken stopt de douchemond met bewegen.

Waterdruk wijzigen

- De Comfort-Seat AB onthoudt de laatst gebruikte instellingen.
- Druk op de HI of LO knop om de waterdruk aan te passen.

Stand douchemond wijzigen

- Druk op de knoppen FR of BK om de positie van de douchemond te wijzigen terwijl de douche gebruikt wordt.
- De positie gaat automatisch aan het eind van het douchen terug naar de middelste stand, voordat het verdwijnt in de zitting.

Temperatuur water wijzigen

- Druk net zo lang op de knop WATER tot de gewenste temperatuur is geselecteerd.

↶ LAAG → MIDDEN → HOOG → UIT ↷

Temperatuur zitting wijzigen

- Druk net zo lang op de knop SEAT tot de gewenste temperatuur is geselecteerd.

↶ LAAG → MIDDEN → HOOG → UIT ↷

Temperatuur van de föhn wijzigen

- Tijdens het droogproces geeft de WATER • DRY indicatoren het temperatuurniveau van de föhn aan.
- De Comfort-Seat AB onthoudt de laatst gebruikte instelling.
- Druk op de HI of LO knop om de temperatuur van de warme lucht aan te passen.

Opmerking

- De Comfort-Seat AB onthoudt de water- en zittingstemperatuur instelling, ook als het apparaat wordt uitgeschakeld. Het is niet nodig om na een stroomstoring dit opnieuw in te stellen.

Verlichting (bedieningspaneel zitting)

- Druk op de knop LIGHT (bedieningspaneel zitting) om de lichtsensor in te schakelen. Deze reageert op verlichting in de ruimte. Druk nogmaals op de knop om het uit te schakelen.
- Wanneer de verlichtingsfunctie is ingeschakeld, detecteert de Comfort-Seat AB automatisch de verlichting in de toiletruimte. Hierdoor is het mogelijk in een onverlichte ruimte een verlicht toilet te gebruiken.

Energiebesparing

- Druk op de knop POWER SAVING om energiebesparingfuncties in te schakelen.
- In de stand AUTO (indicatielampje op zitting) wordt het water op 30°C gehouden en te toiletzitting op temperatuur gehouden.
- In de stand SUPER (indicatielampje op zitting) wordt het water en zitting verwarmd tijdens gebruik.

Schoonmaak douchemond

- Voor en na ieder gebruik wordt de douchemond automatisch gereinigd.
- Voor extra reiniging drukt u gelijktijdig op de knoppen CLEANSING en BIDET MOVE. De douchemond komt naar buiten, zodat u het met de hand kunt reinigen. Doet u dit met een kleine (tanden) borstel. Druk op de knop STOP om de douchemond terug te brengen naar de uitgangpositie.

Massage

- Druk op de knop MASSAGE terwijl de douchefunctie is ingeschakeld voor een pulserend effect.
- Door nogmaals op de knop MASSAGE te drukken stopt u deze functie.

Uitschakelen

- Druk op de knop STOP voor meer dan 4 seconde. De Comfort-Seat AB wordt uitgeschakeld.
- U kunt de Comfort-Seat inschakelen door een willekeurige toets in te drukken (met uitzondering van de knoppen HI en LO). De instellingen blijven bewaard.

Storingen

Heeft u een vraag over of een storing aan een van onze geleverde producten? Neem dan contact op met onze serviceafdeling. U kunt ons bereiken op de volgende manieren:

- Email: service@pronkergo.nl Wij nemen dan per email of telefonisch contact met u op.
- Tijdens het telefonisch spreekuur op 079-363 30 40
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur en 13.00-15.00 uur
- Via het antwoordformulier op onze website www.pronkergo.nl.

Hoofdkantoor Nederland:

Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Tel. (079) 361 13 40
Fax (079) 361 13 41
info@pronkergo.nl

Telefoon Service afdeling:

(079) 363 30 40
service@pronkergo.nl

Bezoek onze website:

www.pronkergo.nl

Pronk ergo bv is aangesloten
bij de FIREVA.
(Fabrikanten en Importeurs van
Revalidatieproducten).

Vestiging Zoetermeer:

Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Tel. (079) 361 13 40
Fax (079) 361 13 40
zoetermeer@pronkergo.nl

Vestiging Halfweg:

Haarlemmerstraatweg 125
1165 MK Halfweg
Tel. (023) 526 38 66

Vestiging Eindhoven:

Bedrijvenweg 5
5627 BW Eindhoven
Tel. (040) 248 43 75

Vestiging Hoogeveen:

Plesmanstraat 81
7903 BG Hoogeveen
Tel. (0528) 23 08 58

Vestiging Sittard:

Dr. Nolenslaan 157 B
6136 GM Sittard
Tel. (046) 457 22 89

Hoofdkantoor België:

Sint-Pietermolenstraat 204/1
8000 Brugge
(050) 32 20 40

Vestiging Brugge:

Sint-Pietermolenstraat 204/1
8000 Brugge
(050) 32 20 40
info@pronkergo.be

Bezoek onze website:

www.pronkergo.be

ZOETERMEER

HALFWEG

EINDHOVEN

HOOGVEEEN

SITTARD

BRUGGE

mogelijkheden zonder beperkingen

Pronk
ergo