

**Pronk
ergo**

Comfort-Seat

Handleiding

Doucheföhn toiletzitting


Type: Blooming Bidet

Model: Start




**Pronk
ergo**

Basisunit

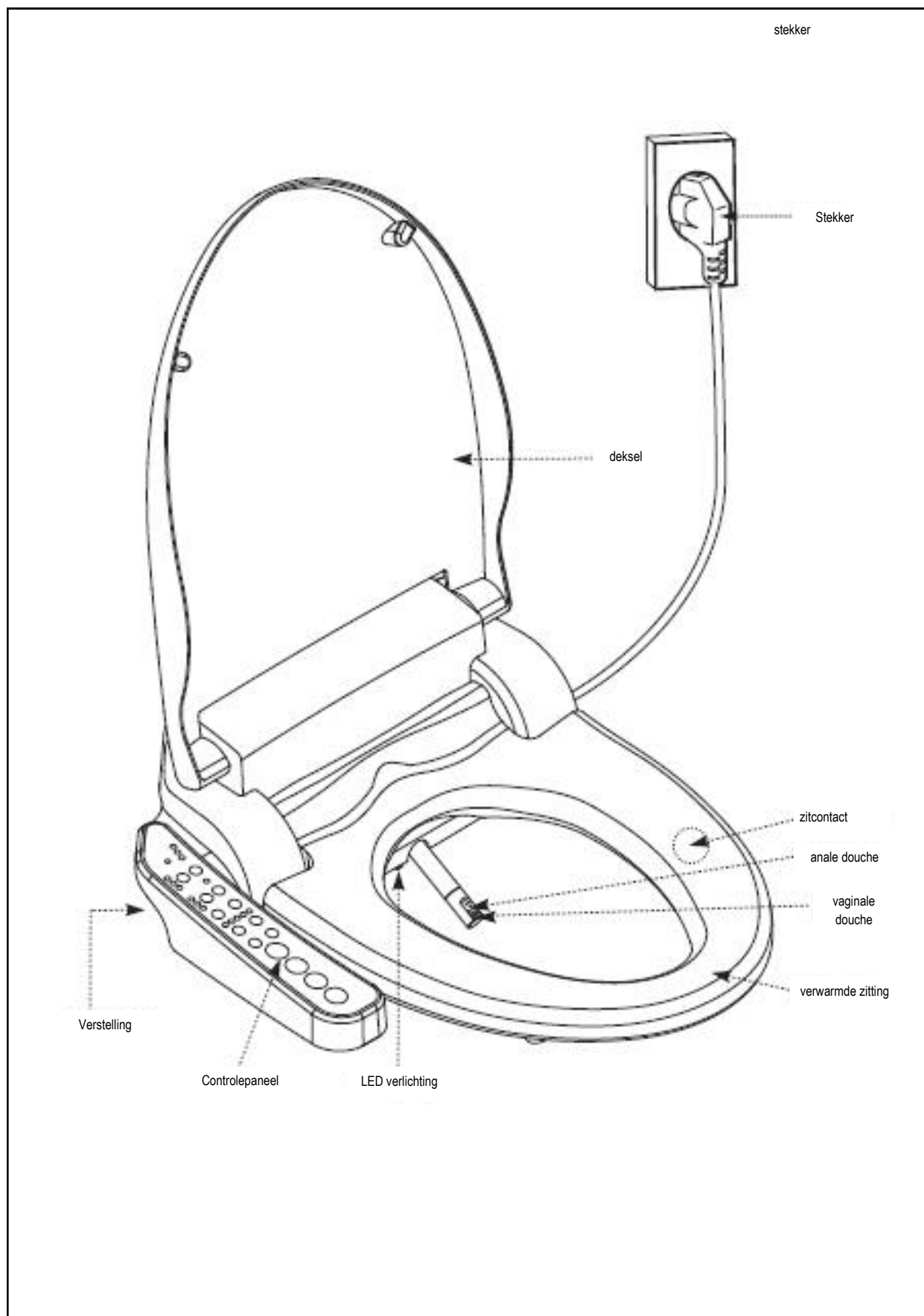

Comfort-Seat

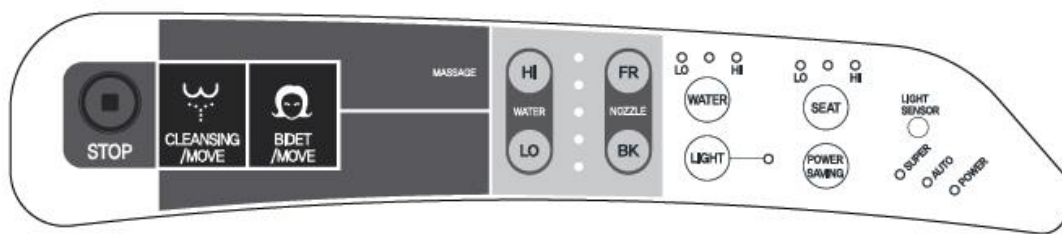


Bedieningspaneel

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Comfort-Seat. In deze handleiding vindt u uitleg over de verschillende functies van de toiletzitting. Mocht u na het lezen nog een vraag hebben dan kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling.


Basisinstructies

1 Neem plaats op de zitting

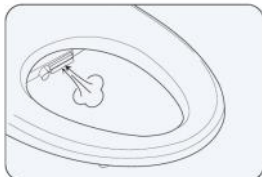

- Ga goed in het midden van de zitting zitten.
- De knop WATER ligt op.

2 Druk op de knop CLEANSING of BIDET

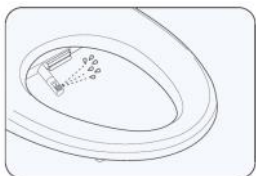

- Druk op de knop CLEANSING voor de anale douche
- Druk op de knop BIDET voor de vaginale douche
- Beide functies worden voor 1 minuut geactiveerd.
- Tijdens het gebruik kan gewisseld worden.

3 Druk op de knop STOP



- Hiermee kunt u alle functies stopzetten.

Algemene informatie

- Gaat u tijdens het gebruik van de Comfort-Seat, goed in het midden van de zitting zitten. (Het zitcontact kan weigeren als u niet in het midden plaats neemt)
- De zitsensor is verwerkt in de zitting. De Comfort-Seat start het proces alleen als het contact maakt met de huid. Wanneer de zitting wordt bedekt door de deksel of iets anders, werkt de zitsensor niet, omdat het geen huidcontact heeft.
- Wanneer de douchefunctie meerdere keren achter elkaar wordt ingeschakeld zal de watertemperatuur langzaam zakken. Om weer warm water te krijgen wacht u drie minuten voor u de douchefunctie weer inschakelt.
- Reinig de Comfort-Seat niet met bijtende of schurende chemische schoonmaakmiddelen. Gebruik een zachte licht vochtige doek. Haal de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken en voorkom dat er water op het apparaat terecht komt.

Overige functies

De sproeierknop (zwenkende douche)

- Wanneer u twee keer op de knoppen CLEANSING of BIDET drukt, zal de douchemond heen en weer worden bewogen tijdens het douchen.
- Door nog een keer op de knop te drukken stopt de douchemond met bewegen.

Waterdruk wijzigen

- De Comfort-Seat onthoudt de laatst gebruikte instellingen.
- Druk op HI en LO knoppen om de waterdruk aan te passen.

Stand douchemond wijzigen

- Druk op de FR of BK knoppen om de positie van de douchemond te wijzigen terwijl de douche gebruikt wordt.
- De positie gaat automatisch aan het eind van het douchen terug naar de middelste stand, voordat het verdwijnt in de zitting.

Temperatuur water wijzigen

- Druk net zo lang op de knop WATER tot de gewenste temperatuur is geselecteerd.

↶ LAAG → MIDDEN → HOOG → UIT ↷

Temperatuur zitting wijzigen

- Druk net zo lang op de knop SEAT tot de gewenste temperatuur is geselecteerd.

↶ LAAG → MIDDEN → HOOG → UIT ↷

Verlichting

- Druk op de knop LIGHT om de lichtsensor in te schakelen. Deze reageert op verlichting in de ruimte. Druk nogmaals op de knop om het uit te schakelen.
- Wanneer de verlichtingsfunctie is ingeschakeld, detecteert de Comfort-Seat automatisch de verlichting in de toiletruimte. Hierdoor is het mogelijk in een onverlichte ruimte een verlicht toilet te gebruiken.
- Het verbruik van de LED-verlichting is minimaal.

Opmerking

- De Comfort-Seat AB onthoudt de water- en zittingstemperatuur instelling, ook als het apparaat wordt uitgeschakeld. Het is niet nodig om na een stroomstoring dit opnieuw in te stellen.

Energiebesparing

- Druk op de knop POWER SAVING om de energie besparingfuncties in te schakelen.
- In de stand AUTO (indicatielampje op zitting) wordt het water op 30°C gehouden en te toiletzitting op temperatuur gehouden.
- In de stand SUPER (indicatielampje op zitting), is uw apparaat het zuinigst in verbruik. Het water en de zitting worden alleen verwarmd op het moment dat u het gebruikt. Wij raden u echter af deze stand te gebruiken, omdat de meeste gebruikers de temperatuur van het water in dit geval te koud vinden.

Schoonmaak douchemond

- Voor en na ieder gebruik wordt de douchemond automatisch gereinigd.
- Voor extra reiniging drukt u gelijktijdig op de knoppen CLEANSING en BIDET. De douchemond komt naar buiten, zodat u het met de hand kunt reinigen. Doet u dit met een kleine (tanden)borstel. Druk op de knop STOP om de douchemond terug te brengen naar de uitgangspositie.

Massage

- Druk op de knop MASSAGE terwijl de douchefunctie is ingeschakeld voor een pulserend effect.
- Door nogmaals op de knop MASSAGE te drukken stopt u deze functie.

Uitschakelen

- Druk op de knop STOP voor meer dan 4 seconde. De Comfort-Seat wordt uitgeschakeld.
- U kunt de Comfort-Seat inschakelen door een willekeurige toets in te drukken. De instellingen blijven bewaard.

Bescherming tegen oververhitting

- De temperatuur van de zitting gaat omlaag, wanneer de zittemperatuur op hoog staat en u meer dan 30 minuten op de zitting zit. (Dit ter voorkoming van oververhitting van de huid)
- Wanneer u van de zitting afgaat wordt de stand weer hersteld.

Storingen

Heeft u een vraag over of een storing aan een van onze geleverde producten? Neem dan contact op met onze serviceafdeling. U kunt ons bereiken op de volgende manieren:

- Email: service@pronkergo.nl Wij nemen per email of telefonisch contact met u op.
- Telefoon 079-363 30 40
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur en 13.00-15.00 uur
- Via het antwoordformulier op onze website www.pronkergo.nl.

Hoofdkantoor:
Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Tel. (079) 361 13 40
info@pronkergo.nl

Telefoon Service afdeling:
(079) 363 30 40
service@pronkergo.nl

Bezoek onze website:
www.pronkergo.nl

Vestiging Zoetermeer:
Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Tel. (079) 361 13 40
zoetermeer@pronkergo.nl

Vestiging Halfweg:
Haarlemmerstraatweg 125
1165 MK Halfweg

Vestiging Eindhoven:
Bedrijvenweg 5
5627 BW Eindhoven

Vestiging Hoogeveen:
Plesmanstraat 81
7903 BG Hoogeveen

Vestiging Sittard:
Dr. Nolenslaan 157 B
6136 GM Sittard

Vestiging Brugge:
Sint-Pietermolenstraat 204/1
8000 Brugge
(050) 32 20 40
info@pronkergo.be

Bezoek onze website:
www.pronkergo.be

ZOETERMEER

HALFWEG

EINDHOVEN

HOOGVEEEN

SITTARD

BRUGGE

mogelijkheden zonder beperkingen

Pronk
ergo