

Pronk
ergo

Comfort-Seat



Handleiding


Doucheföhn toiletzitting

Type: Blooming Bidet

Model: Elegance


Pronk
ergo

Basisunit

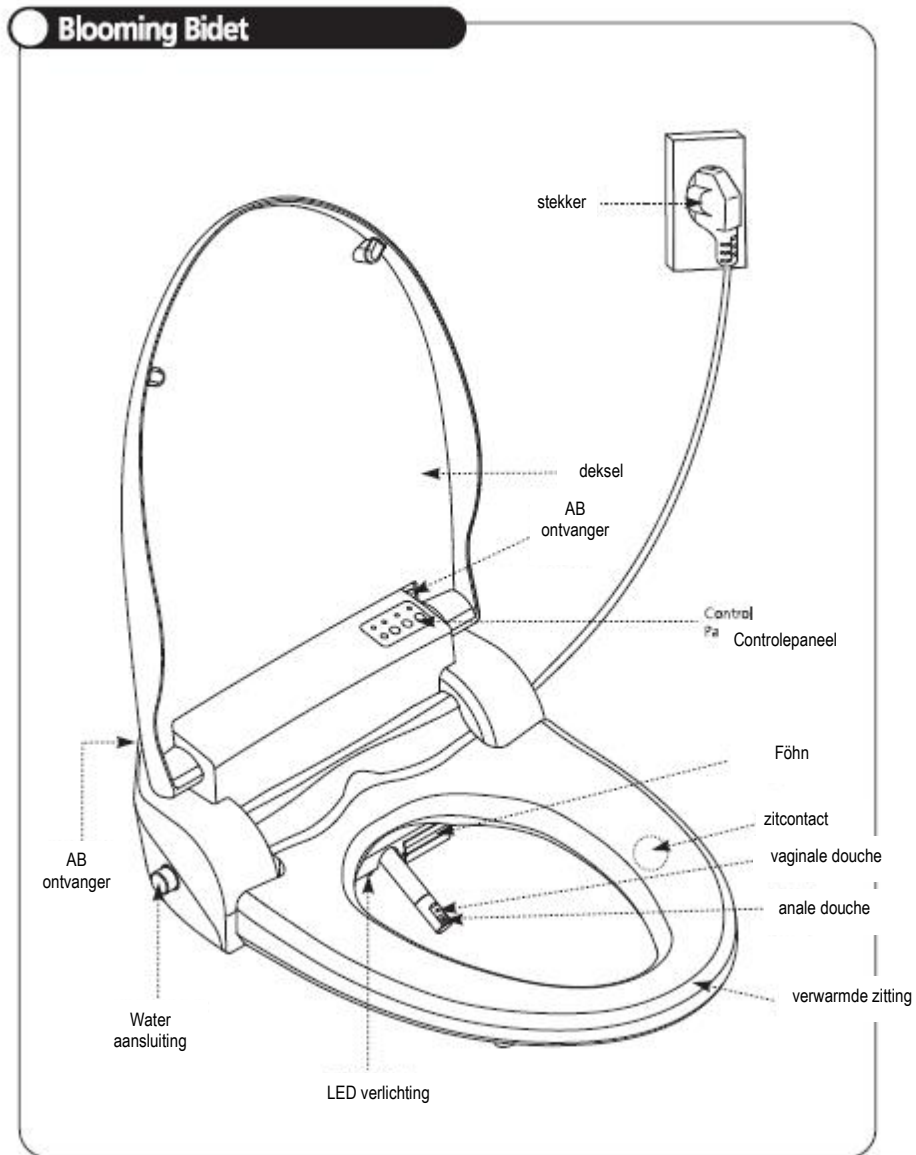


Comfort-Seat


Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Comfort-Seat. In deze handleiding vindt u uitleg over de verschillende functies van de toiletzitting. Mocht u na het lezen nog een vraag hebben dan kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling.

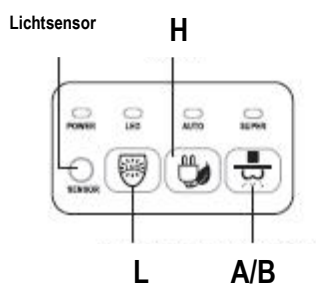

Controlepaneel op de zitting

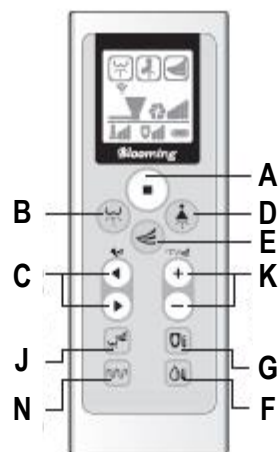

Afstandsbediening (standaard geleverd)

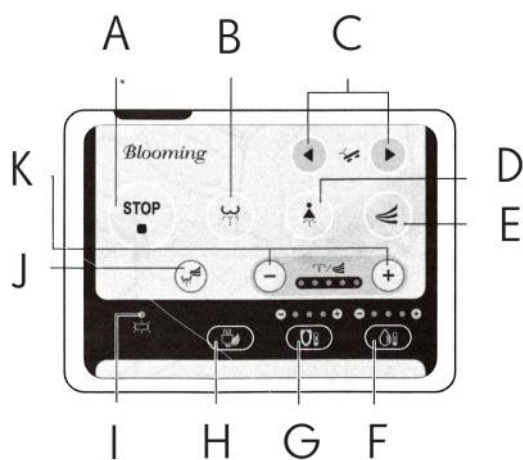

Afstandsbediening (optioneel)

Basisinstructies


- Het controlepaneel op de zitting is slechts voor noodgevallen. Alle instellingen kunnen worden uitgevoerd met de afstandsbediening.
- Laat de afstandsbediening niet vallen en hou deze schoon om problemen te voorkomen.

1 Neem plaats op de zitting



- Ga goed in het midden van de zitting zitten.
- Het zitcontact is in de zitting verwerkt. Deze treed alleen in werking door de aanraking van huid. Dek het zitcontact niet af, want dan zal de Comfort-Seat niet reageren.

2 Druk op de knop REINIGEN (B) of DAMESDOUCHE (D)

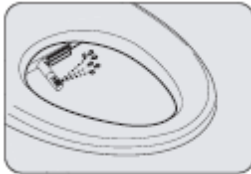

- Druk op de knop REINIGEN (B) voor de anale douche
- Druk op de knop DAMESDOUCHE (D) voor de vaginale douche
- Beide functies worden voor 1 minuut geactiveerd.
- Tijdens het gebruik kan gewisseld worden.
- Een pieptoon geeft aan dat het douchen wordt beëindigd.

3 Druk op de knop FOHNEN (E)



- De FOHNEN indicator licht op en de föhn wordt gestart.
- U wordt 3 minuten geföhnd. (Tijdens de automatische schoonmaak 1 minuut)
- Een pieptoon geeft aan dat het föhnen wordt beëindigd.

4 Druk op de knop STOP (A)



- Hiermee kunt u alle functies stopzetten.

Algemene informatie

- Gaat u tijdens het gebruik van de Comfort-Seat, goed in het midden van de zitting zitten. (Het zitcontact kan weigeren als u niet in het midden plaats neemt)
- Wanneer de douchefunctie meerdere keren achter elkaar wordt ingeschakeld zal de watertemperatuur langzaam zakken. Om weer warm water te krijgen wacht u drie minuten voor u de douchefunctie weer inschakelt.
- Reinig de Comfort-Seat niet met bijtende of schurende chemische schoonmaakmiddelen. Gebruik een zachte licht vochtige doek. Haal de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken en voorkom dat er water op het apparaat terecht komt.

Overige functies

De sproeierknop (zwenkende douche) (B of D)

- Wanneer u twee keer op de knop REINIGEN (B) of DAMESDOUCHE (D) drukt, zal de douchemond heen en weer worden bewogen tijdens het douchen.
- Door nog een keer op de knop te drukken stopt de douchemond met bewegen.

Waterdruk wijzigen

- De Comfort-Seat AB onthoudt de laatst gebruikte instellingen.
- Druk op + en - knoppen (K) om de waterdruk aan te passen.

Stand douchemond wijzigen

- Druk op de PIJL knoppen (C) om de positie van de douchemond te wijzigen terwijl de douche gebruikt wordt.
- De positie gaat automatisch aan het eind van het douchen terug naar de middelste stand, voordat het verdwijnt in de zitting.

Temperatuur water wijzigen

- Druk net zo lang op de knop WATER (F) tot de gewenste temperatuur is geselecteerd.

↶ LAAG → MIDDEN → HOOG → UIT ↷

Temperatuur zitting wijzigen

- Druk net zo lang op de knop ZITTING (G) tot de gewenste temperatuur is geselecteerd.

↶ LAAG → MIDDEN → HOOG → UIT ↷

Temperatuur van de föhn wijzigen

- Tijdens het droogproces geeft de WATER • DROOG (K) indicatoren het temperatuurniveau van de föhn aan.
- De Comfort-Seat onthoudt de laatst gebruikte instelling.
- Druk op de + en - knoppen (K) om de temperatuur van de warme lucht aan te passen.

Opmerking

- De Comfort-Seat AB onthoudt de water- en zittingstemperatuur instelling, ook als het apparaat wordt uitgeschakeld. Het is niet nodig om na een stroomstoring dit opnieuw in te stellen.

Verlichting (bedieningspaneel zitting)

- Druk op de knop LICHT (L) (bedieningspaneel zitting) om de lichtsensor in te schakelen. Deze reageert op verlichting in de ruimte. Druk nogmaals op de knop (L) om het uit te schakelen.
- Wanneer de verlichtingsfunctie is ingeschakeld, detecteert de Comfort-Seat AB automatisch de verlichting in de toiletruimte. Hierdoor is het mogelijk in een onverlichte ruimte een verlicht toilet te gebruiken.

Energiebesparing

- Druk op de knop ENERGIEBESPARING (H) om energiebesparingfuncties in te schakelen.
- In de stand AUTO (indicatielampje op zitting) wordt het water op 30°C gehouden en te toiletzitting op temperatuur gehouden.
- In de stand SUPER (indicatielampje op zitting) wordt het water en zitting verwarmd tijdens gebruik.

Schoonmaak douchemond

- Voor en na ieder gebruik wordt de douchemond automatisch gereinigd.
- Voor extra reiniging drukt u gelijktijdig op de knoppen REINIGEN en DAMESDOUCHE (H en A/B) op het controlepaneel op de zitting. De douchemond komt naar buiten, zodat u het met de hand kunt reinigen. Doet u dit met een zachte (tanden)borstel. Druk op de knop STOP (A) om de douchemond terug te brengen naar de uitgangpositie.

Massage

- Druk op de knop MASSAGE (bedieningspaneel zitting) (N) terwijl de douchefunctie is ingeschakeld voor een pulserend effect.

Uitschakelen

- Druk op de knop STOP (A) voor meer dan 4 seconde. De Comfort-Seat AB wordt uitgeschakeld.
- U kunt de Comfort-Seat inschakelen door een willekeurige toets in te drukken (met uitzondering van de knoppen + en - (K)). De instellingen blijven bewaard.

Help (alleen voor model AB)

- Wanneer u op de knop HELP (bedieningspaneel zitting) (M) klikt er voor 30 seconde een geluidsignaal, zodat eventuele huisgenoten u hulp kunnen bieden.
- Het geluidsignaal kan worden gestopt door te drukken op STOP (A) of nogmaals op HELP (N) te drukken.

Automatisch programma

- Door het AUTOMATISCHE PROGRAMMA (J) in te drukken wordt u het reinigen en drogen beide voor 1 minuut na elkaar uitgevoerd.
- Hierbij wordt een standaard instelling aangehouden, deze zijn tijdens het programma aan te passen.
- Er klinkt een geluidsignaal wanneer het programma beëindigt is


Hittebescherming

- De temperatuur van de zitting wordt automatisch na dertig minuten verlaagd, wanneer deze in de hoogste stand staat. Dit om brandwonden te voorkomen.
- De temperatuur wordt na resetten of onbelasten van de zitting terug gebracht naar de laatste instelling.

Batterijen wisselen afstandsbediening

- Het LCD scherm schakelt zich automatisch uit wanneer 4 minuten lang geen knoppen worden ingedrukt.
- Wissel de batterijen voor nieuwe als het batterij icoon knippert. De batterijen gaan ongeveer een jaar mee.

1. Haal de afstandsbediening uit de houder.
2. Open de batterijdeksel en verwijder de gebruikte batterijen.
3. Plaats nieuwe batterijen en sluit het deksel.
4. Plaats de afstandsbediening terug in de houder.

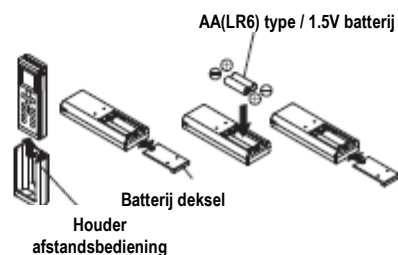

Storingen

Heeft u een vraag over of een storing aan een van onze geleverde producten? Neem dan contact op met onze serviceafdeling. U kunt ons bereiken op de volgende manieren:

- Email: service@pronkergo.nl. Wij nemen dan per email of telefonisch contact met u op.
- Telefoon 079-363 30 40
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur en 13.00-15.00 uur
- Via het antwoordformulier op onze website www.pronkergo.nl.

Hoofdkantoor Nederland:
Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Tel. (079) 361 13 40
info@pronkergo.nl

Telefoon Service afdeling:
(079) 363 30 40
service@pronkergo.nl

Bezoek onze website:
www.pronkergo.nl

Vestiging Zoetermeer:
Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Tel. (079) 361 13 40
zoetermeer@pronkergo.nl

Vestiging Halfweg:
Haarlemmerstraatweg 125
1165 MK Halfweg

Vestiging Eindhoven:
Bedrijvenweg 5
5627 BW Eindhoven

Vestiging Hoogeveen:
Plesmanstraat 81
7903 BG Hoogeveen

Vestiging Sittard:
Dr. Nolenslaan 157 B
6136 GM Sittard

Hoofdkantoor België:
Sint-Pietermolenstraat 204/1
8000 Brugge
(050) 32 20 40

Vestiging Brugge:
Sint-Pietermolenstraat 204/1
8000 Brugge
(050) 32 20 40
info@pronkergo.be

Bezoek onze website:
www.pronkergo.be

ZOETERMEER

HALFWEG

EINDHOVEN

HOOGVEEEN

SITTARD

BRUGGE

mogelijkheden zonder beperkingen

Pronk
ergo

CSB- 2021 - 01