



VERKORTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Molift Quick Raiser 2

1. Breng allereerst de tilband aan [zie ook kader maatherkenning]. De onderzijde van de band zo laag mogelijk d.w.z. tot net boven de (denkbeeldige) broekband. De rode okselkussentjes op de tilband geven de bovenzijde van de band aan. Deze okselkussentjes hoeven **NIET** strak onder de oksels te zitten. Klik de gesp aan de voorzijde in elkaar en trek de zwarte band aan.
2. Zwenk indien mogelijk de beensteunen van de rolstoel weg. Kan dit niet, dan dienen in ieder geval de voetplaten van de rolstoel te worden opgeklapt.
3. Wanneer de poten van de Quick Raiser in de smalle stand om de een of andere reden niet onder de (rol)stoel door kunnen, spreid dan de poten van het onderstel van de Quick Raiser (zodanig) maximaal.
4. Rijd de Quick Raiser aan met het tiljuk tegen de kolom aan gekanteld. Plaats de voeten van de zorgvrager op de hiervoor bestemde grijze kunststof voetplaten van de lift.
5. Duw de Quick Raiser nu zo diep mogelijk om de rolstoel opdat de kniesteunkussens de knieën van de zorgvrager raken.
6. Stel de kniesteunbeugel in op de juiste hoogte d.w.z. de bovenzijde van de kniekussens n t onder de knieschijf.
7. Maak de kuitband achterlangs vast.

NB: Wanneer de kuitband niet wordt gebruikt, laat deze dan niet los hangen maar klik de beide delen achter om de hef kolom in elkaar opdat de kuitband niet in de weg zit en nergens tussen kan komen. De kuitband kan ook in zijn geheel worden weggenomen door de gespen aan beide kanten los te klikken.

8. Kantel nu het tiljuk voorzichtig naar de zorgvrager.
9. Bevestig vervolgens de touwen van de tilband van binnen naar buiten door de gaffels van het tiljuk.

De beide touwen hoeven niet op spanning te staan. Wanneer de zorgvrager tegen de rugleuning rust, de Quick Raiser volledig is aangereden en het tiljuk naar de zorgvrager is gekanteld, dienen de touwen n t niet strak te staan.

10. Vraag de zorgvrager de grijze handvatten van het tiljuk vast te pakken. Leg de zorgvrager uit wat er gaat gebeuren en stimuleer hem/haar om actief deel te nemen aan het tot stand komen. Vraag de zorgvrager de schouders tijdens het opstaan zo veel mogelijk naar achter te houden.

HET OPSTAAN KAN BEGINNEN.....



molift
QUICK RAISER 2

LET OP!

Er zijn drie standaard maten van de tilband:

Small

rode driehoek op waslabel

Medium

gele driehoek op waslabel

Large

groene driehoek op waslabel

"Maatherkenning aan de hand van het gekleurde label"

Pronk
ergo bv

Hoofdkantoor Zoetermeer

Adres Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Tel. (079) 361 13 40
Fax (079) 361 13 41
E-mail zoetermeer@pronkergo.nl
Internet www.pronkergo.nl

zelfstandiger in beweging



Opladen van de Molift Quick Raiser 2 voorzien van 1 "Power pac"

**Uw Molift Quick Raiser 2 is uitgerust met het
zogenaamde "Power pac" laadsysteem.**

**De meegeleverde accu is van het type Ni-Cd (Nikkel-Cadmium).
De oplader is van het type 1915.**



Molift Quick Raiser 2 voorzien
van "Power pac"

HANTEER HET NAVOLGENDE LAADGEDRAG:

1. Plaats de accu in de accuhouder achter op de hef kolom van de lift.
2. De accu past maar op één manier in de accuhouder [zwarte pijl naar beneden].
3. Gebruik de lift net zo lang totdat de accu (nagenoeg) leeg is.
4. Dit wordt aangekondigd door middel van het permanent oplichten van een **rood** LED-je op de basis van de lift tijdens het tillen.
5. Met het "Power pac" systeem is een wandlader (met of zonder tafelhouders) meegeleverd.
6. Deze oplader kan desgewenst aan de wand worden bevestigd met behulp van bijgeleverd montage materiaal (pluggen en schroeven).
7. De oplader blijft permanent verbonden met het stopcontact.

- Pas wanneer de accu (nagenoeg) leeg is, mag deze worden opgeladen. Plaats de lege accu in de oplader.
- In eerste instantie zal het **groene** LED-je van de oplader permanent oplichten. Na ca. 1 à 1½ uur gaat dit **groene** LED-je knipperen. De accu is nu bijna vol, de oplader gaat over op zogenaamde 'druppellading'. 'Overladen' van de accu is niet mogelijk.

MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN UW POWER PAC SYSTEEM!

molift



"Power pac" op hef kolom

**Pronk
ergo** bv

Hoofdkantoor Zoetermeer

Adres Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Tel. (079) 361 13 40
Fax (079) 361 13 41
E-mail zoetermeer@pronkergo.nl
Internet www.pronkergo.nl

zelfstandiger in beweging



Opladen van de Molift Quick Raiser 2 voorzien van 1 "Power pac"

**Uw Molift Quick Raiser 2 is uitgerust met het
zogenaamde "Power pac" laadsysteem.**

**De meegeleverde accu is van het type Ni-Cd (Nikkel-Cadmium).
De oplader is van het type 2015.**



Molift Quick Raiser 2 voorzien
van "Power pac"

HANTEER HET NAVOLGENDE LAADGEDRAG:

1. Plaats de accu in de accuhouder achter op de hefkolom van de lift.
2. De accu past maar op één manier in de accuhouder [zwarte pijl naar beneden].
3. Gebruik de lift net zo lang totdat de accu (nagenoeg) leeg is.
4. Dit wordt aangekondigd door middel van het permanent oplichten van een **rood** LED-je op de basis van de lift tijdens het tillen.
5. Met het "Power pac" systeem is een wandlader (met of zonder tafelhoeder) meegeleverd.
6. Deze oplader kan desgewenst aan de wand worden bevestigd met behulp van bijgeleverd montage materiaal (pluggen en schroeven).
7. De oplader blijft permanent verbonden met het stopcontact.

• NiCd-oplader

De oplader heeft een LED welke de status van de accu weergeeft zoals in onderstaand schema is aangegeven:

LED	Status	Output
Geel	Geen accu aanwezig	25 V
Geel	Opstarten (10 sec.)	100 mA
Oranje	Snel lading	1,8 A
Groen/geel	Einde laadcyclus	270 mA
Groen	Druppel lading	100 mA
Oranje/groen	Foutmelding	100 mA

molift



"Power pac" op hefkolom

**Pronk
ergo** bv

Hoofdkantoor Zoetermeer

Adres Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Tel. (079) 361 13 40
Fax (079) 361 13 41
E-mail zoetermeer@pronkergo.nl
Internet www.pronkergo.nl

MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN UW POWER PAC SYSTEEM!

zelfstandiger in beweging



Opladen van de Molift Quick Raiser 2 voorzien van 2 "Power pacs"

Uw Molift Quick Raiser 2 is uitgerust met het zogenaamde "Power pac" laadsysteem.

**De beide meegeleverde accu's zijn van het type Ni-Cd (Nikkel-Cadmium).
De oplader is van het type 1915.**

HANTEER HET NAVOLGENDE LAADGEDRAG:

1. Plaats één van de twee accu's in de accuhouder achter op de hefkolom van de lift.
2. De accu past maar op één manier in de accuhouder [**zwarte** pijl naar beneden].
3. Gebruik de lift met de aanwezige accu net zo lang totdat deze (nagenoeg) leeg is.
4. Dit wordt aangekondigd door middel van het permanent oplichten van een **rood** LED-je op de basis van de lift tijdens het tillen.
5. Met het "Power pac" systeem is een wandlader (met of zonder tafelhouders) meegeleverd.
6. Deze oplader kan desgewenst aan de wand worden bevestigd met behulp van bijgeleverd montage materiaal (pluggen en schroeven).
7. De oplader blijft permanent verbonden met het stopcontact.
8. De niet in gebruik zijnde (tweede) accu blijft permanent gestationeerd in de wandlader. De accu kan niet worden 'overladen'.

- Pas als de op de lift geplaatste accu leeg is, mag deze worden omgewisseld. De volle, uit de wandlader afkomstige accu, wordt in de accuhouder van de lift geplaatst.
- De lege, uit de lift afkomstige accu, wordt in de wandhouder geplaatst.
- In eerste instantie zal het **groene** LED-je van de oplader permanent oplichten. Na ca. 1 à 1½ uur gaat dit **groene** LED-je knipperen. De accu is nagenoeg vol, de oplader gaat over op zogenaamde 'druppellading'. De in de oplader geplaatste (inmiddels volle) accu mag gewoon in de oplader geplaatst blijven. Pas wanneer de op de lift geplaatste accu leeg is, volgt de volgende 'wissel'.



Molift Quick Raiser 2 voorzien van "Power pac"

molift



"Power pac" op hefkolom

**Pronk
ergo** bv

Hoofdkantoor Zoetermeer

Adres Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Tel. (079) 361 13 40
Fax (079) 361 13 41
E-mail zoetermeer@pronkergo.nl
Internet www.pronkergo.nl

zelfstandiger in beweging

MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN UW POWER PAC SYSTEEM!



Opladen van de Molift Quick Raiser 2 voorzien van 2 "Power pacs"

**Uw Molift Quick Raiser 2 is uitgerust met het
zogenaamde "Power pac" laadsysteem.**

**De beide meegeleverde accu's zijn van het type Ni-Cd (Nikkel-Cadmium).
De oplader is van het type 2015.**

HANTEER HET NAVOLGENDE LAADGEDRAG:

1. Plaats één van de twee accu's in de accuhouder achter op de hefkolom van de lift.
 2. De accu past maar op één manier in de accuhouder [**zwarte** pijl naar beneden].
 3. Gebruik de lift met de aanwezige accu net zo lang totdat deze (nagenoeg) leeg is.
 4. Dit wordt aangekondigd door middel van het permanent oplichten van een **rood** LED-je op de basis van de lift tijdens het tillen.
 5. Met het "Power pac" systeem is een wandlader (met of zonder tafelhouders) meegeleverd.
 6. Deze oplader kan desgewenst aan de wand worden bevestigd met behulp van bijgeleverd montage materiaal (pluggen en schroeven).
 7. De oplader blijft permanent verbonden met het stopcontact.
 8. De niet in gebruik zijnde (tweede) accu blijft permanent gestationeerd in de wandlader. De accu kan niet worden 'overladen'.
- **NiCd-oplader**

De oplader heeft een LED welke de status van de accu weergeeft zoals in onderstaand schema is aangegeven:

LED	Status	Output
Geel	Geen accu aanwezig	25 V
Geel	Opstarten (10 sec.)	100 mA
Oranje	Snel lading	1,8 A
Groen/geel	Einde laadcyclus	270 mA
Groen	Druppel lading	100 mA
Oranje/groen	Foutmelding	100 mA



Molift Quick Raiser 2 voorzien van "Power pac"

molift



"Power pac" op hefkolom

**Pronk
ergo** bv

Hoofdkantoor Zoetermeer

Adres Cobaltstraat 14-15
2718 RM Zoetermeer
Tel. (079) 361 13 40
Fax (079) 361 13 41
E-mail zoetermeer@pronkergo.nl
Internet www.pronkergo.nl

MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN UW POWER PAC SYSTEEM!

zelfstandiger in beweging